


micromega®

Righello per la distanza interpupillare


Istruzioni di Stampa

Stampare questa pagina impostando la scala personalizzata al 100%.
La larghezza del righello stampato deve risultare 175 mm.

MAC

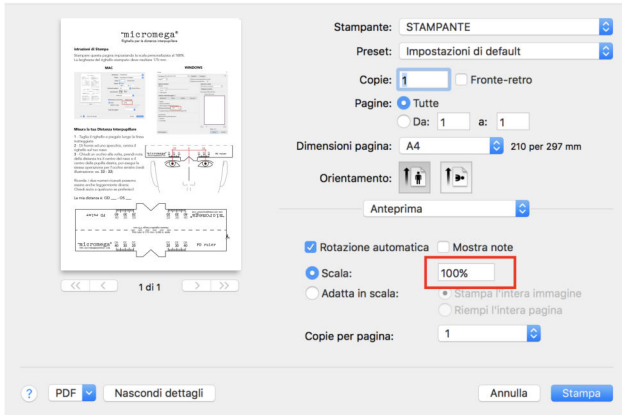

WINDOWS

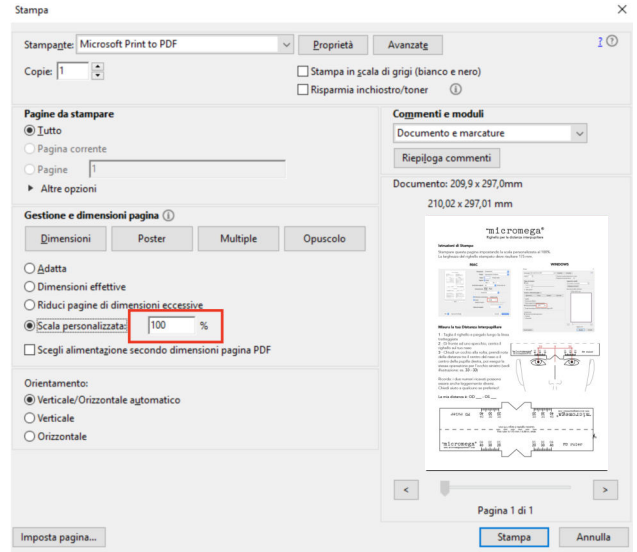

Misura la tua Distanza Interpupillare

- 1 - Taglia il righello e piegalo lungo la linea tratteggiata
- 2 - Di fronte ad uno specchio, centra il righello sul tuo naso
- 3 - Chiudi un occhio alla volta, prendi nota della distanza tra il centro del naso e il centro della pupilla destra, poi esegui la stessa operazione per l'occhio sinistro (vedi illustrazione: es. 33 - 33)

Ricorda: i due numeri ricavati possono essere anche leggermente diversi.
Chiedi aiuto a qualcuno se preferisci!

La mia distanza è: OD ___ - OS ___

